


# K1 BOX取り扱い説明

## 同梱内容

- ①本体K1 BOX：1
- ②ミニ三脚：1
- ③USBケーブル：1
- ④マグネット取付プレート：2



## 本体説明

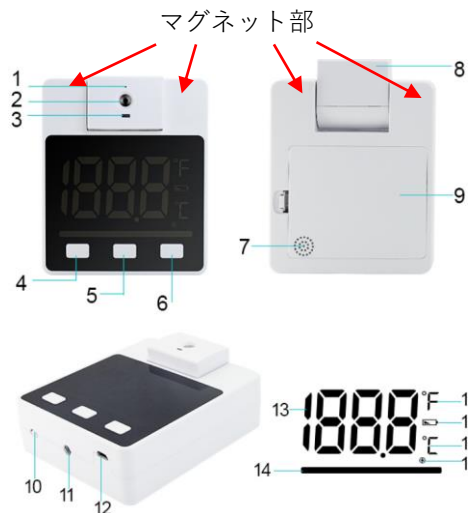

1. 測定インジケータ
2. オートセンスプローブ
3. レーザーセンサー
4. ボディーbod/物体表面温度sur
5. メモリー/アラート設定
6. °C/F,言語切替
7. スピーカー
8. プローブ
9. バッテリーカバー
10. 電源スイッチ
11. 三脚取付穴
12. USB充電
13. 温度測定結果
14. LEDインジケータ(緑・赤)
15. 華氏/F
16. 摂氏/°C
17. ローバッテリーインジケータ
18. チャージランプ

## ステータス説明

スタンバイ：ディスプレイ中央の白い点が順番に点滅 図1

正常温度：「正常な温度です」「時間を置いてもう一度測定してください」の音声とLEDインジケータは緑の点灯 図2



図1



図2

異常温度：「高温を検知しました正確な体温を測ってください」の音声とLEDインジケータは赤の点灯とブザー音 図3

測定範囲外の低温：「もう一度測定してください」の音声と表示はLO LEDインジケータは赤の点滅 図4

測定範囲外の高温：「もう一度測定してください」の音声と表示はHI LEDインジケータは赤の点灯 図5



図3



図4



図5

バッテリー電圧低下：17番の電池マーク が点灯

充電ランプ：18650Li-ion電池使用時にチャージランプは充電時赤,充電完了緑が点灯。

\* 充電電池18650Li-ion電池は同梱しておりません。


## 使用操作説明

\* 設置環境に電源10番を投入後30分以上おいてから使用してください。

1-1. 短く4番 を押すと温度を測定します。

1-2. 長く を押すとボディーbodまたは物体表面温度surに切替えができます。

2. 測定はプローブに対して平行に1~10cmの間で額を近づけてください。自動的に測定を行います。

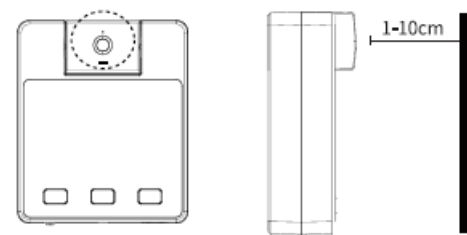

3. 短く6番 のボタンを押すと°Cと°Fの切替え

4. 短く5番 のボタンを押すと記録された過去60件の温度が<>ボタンで表示

5-1 長く ボタンを押すとF1が表示され<>ボタンで0-6段階で音量変更ができます。

5-2 短く を押すとF2が表示され<>ボタンで10ヶ国語の選択ができます。

5-3 短く を押すとF3が表示され<>ボタンでアラート温度設定を37.4~42.9°の範囲で設定できます。

最後に短く を押すと測定モードへ戻ります。

